

# FD 360

## Очистка и уход за искусственной кожей



FD 360 бережно очищает и защищает обивку кресел из искусственной кожи, в значительной степени сохраняя внешний вид зубоврачебных кресел и другой обивки из искусственной кожи. При одновременном использовании FD 360 и прилагаемой специальной губки обеспечиваются глубокая очистка и быстрое удаление даже трудновыводимых пятен, загрязнений и изменений цвета, напр., изза воздействия нестойких красителей одежды. FD 360 обеспечивает интенсивную очистку и уход, не оставляет следов; шелковистый блеск.

Состав: действие FD 360 основано на сочетании специальных ПАВ, силиконовых соединений и защитных компонентов на основе масла авокадо.

Применение: применять FD 360 неразбавленным. Распылить FD 360 на очищаемую поверхность и сразу протереть салфеткой или для усиления эффекта растереть FD 360 специальной губкой. За счет этого достигается более тщательная и глубокая очистка. Затем удалить остатки FD 360 сухой тканью. При необходимости применять FD 360 ежедневно.

Указания: FD 360 можно применять для любых поверхностей из искусственной кожи. Перед обработкой поверхности из натуральной кожи сначала проверить на совместимость на скрытом участке. Для натуральной кожи нельзя использовать специальную губку.