

# FD 366 sensitive

## Дезинфекция чувствительных поверхностей



FD 366 sensitive – не содержащий альдегида, готовый к применению раствор для быстрой дезинфекции и очистки чувствительных поверхностей - обивки оборудования и оснащения из пластмасс и кожзаменителя, поверхностей из оргстекла, крышек и панелей приборов, смесительных сосудов (в т.ч. для вакуумных смесителей), креплений и держателей для шлангов, плевательниц, сенсорных клавиш, машин для проявления рентгеновских пленок XR, и т.д. перед их последующей обработкой и т.д. Кроме того, средство FD 366 sensitive перед дальнейшей обработкой в соответствии с указаниями производителя можно использовать для дезинфекции наружных поверхностей медицинских изделий, таких как турбины, прямые и угловые наконечники. Раствор FD 366 sensitive быстро сохнет.

Состав: 100 г раствора FD 366 sensitive содержат 17 г 1-про-панола, 0,25 г алкил-бензил-диметил-аммония хлорида 50 %, вспомогательные вещества и воду.

Спектр действия: бактерицидное, туберкулоцидное, леву-роцидно, ограниченно вируцидное действие (капсулирован- ные вирусы типа Vaccinia, в т.ч. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ<sup>1)</sup> а также безоболочечные вирусы типа Ного-вирусов). Занесен в список VАН. Испытано в соответствии со стандартами EN 14348, EN 14476, EN 16615.

<sup>1)</sup> В соответствии с рекомендацией Института Роберта Коха (Федеральный вестник здравоохранения Германии) (Bundesgesundheitsbl.) 47, 62- 66, 2004).

Применение: Использовать FD 366 sensitive в неразбавленном виде. Нанести FD 366 sensitive на салфетку и полностью смочить поверхности; небольшие, труднодоступные поверхности можно опрыскать напрямую. Салфетки FD multi wipes/FD multi wipes compact с пропиткой из FD 366 sensitive использовать аналогично. Полностью опрыскать дезинфицируемые поверхности и предметы и дать высохнуть. Время воздействия в соответствии с рекомендациями VАН – 1 минута (см. таблицу в „DE“). Дополнительные указания - см. также информацию о продукте на нашем сайте.

Примечания: Температура вспышки 33 °С. Максимальная дозировка 50 мл/м<sup>2</sup>. Соблюдать осторожность при очистке поверхностей, чувствительных к спирту (акрилового стекла и т.п.). Перед обработкой чувствительных поверхностей про-верить совместимость материалов на незаметном месте.

Внимание. Жидкость и пар способны воспламеняться. Вызывает сильное раздражение глаз. Не распылять на открытое пламя или другой источник возгорания. Носить защитные перчатки и защитные очки/маску. ПРИ ПОПАДА-НИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно про-мыть глаза водой. При наличии контактных линз, по воз-

# FD 366 sensitive

## Дезинфекция чувствительных поверхностей

возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов.

CE 0297

Dürr Dental AG  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerr.de](mailto:info@duerr.de)

2016-12

